



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSATI)

Vēl nav vērtējumu



Apraksts

Axiostat® 8×8×0.5 cm hemostatiskais plāksteris

Axiostat® hemostatiskais plāksteris (8×8 cm) ir sterils, vienreizlietojams, neabsorbējošs līdzeklis, kas paredzēts vidēji stipras un smagas asiņošanas pagaidu apturēšanai neatliekamās situācijās un traumu gadījumos. Izgatavots ar PBT® (Protonated Bioadhesive Polymer Technology), tas izmanto 100% hitozāna dabiskās bioadhēzijas īpašības, lai ātri apstādinātu asiņošanu un izveidotu drošu barjeru. Atšķirībā no pārklātiem pārsējiem, Axiostat ir proteīnu nesaturošs, nealerģisks un neatstāj brūcē atliekas. Viegls un vakuumā iepakots – piemērots kaujas laukam, neatliekamajai medicīnai un pirmsslimnīcas aprūpei.

Kā tas darbojas

1. **Kompresija:** uzklāj tieši uz brūces vietas.
2. **Lādētu molekulu adhēzija:** pozitīvi lādētās hitozāna molekulas saistās ar negatīvi lādētām asins šūnām.
3. **Plazmas absorbcija:** ātri absorbē plazmu, koncentrējot asins recēšanas



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ADMAKSALI)

faktorus.

4. **Trombocītu aktivācija:** veicina trombocītu aktivāciju un fibrīna tikla veidošanos.
5. **Hemostāze:** izveido spēcīgu barjeru, kas apstādina asiņošanu ātrāk nekā dabiskā recēšanas kaskāde.

Pie fizioloģiskā pH plāksteris **vieglāk noņemams**, neradot papildu traumu.

Indikācijas

- Šautas brūces
- Dūrieni vai duršanas brūces
- Sprādzienu traumas
- Griezumi, plīsumi, noberzumi
- Artēriju un vēnu asiņošana
- Galvas, kakla un sejas traumas
- Situācijas, kur **nav iespējams lietot žņaugus**

Galvenās īpašības

- **100% hitozāns** – pārāks hemostatiskais efekts salīdzinājumā ar pārklātiem pārsējiem
- **Proteīnu nesaturošs un nealerģisks**
- Ātra asiņošanas apturēšana – **ātrāk nekā dabiska recēšana**
- **Kompakts vakuuma iepakojums**
- **Var sagriezt, salocīt vai ievietot dziļās brūcēs**
- Viegls un pārnēsājams – ideāls izmantošanai laukā

Specifikācija

Izmērs	8 × 8 × 0,5 cm
Materiāls	100% hitozāns
Lietošana	Sterils, vienreizlietojams, neabsorbējošs plāksteris
Iepakojums	Viegls, vakuumā iepakots
Sertifikāti	BIS, CE, ISO 13485:2016, FDA, NSN (atsevišķiem veidiem)

Ieteicamā lietošana

Piemērots **traumu aprūpei, kaujas apstākļiem, neatliekamajai palīdzībai un pirmās palīdzības sniegšanai**. Īpaši noderīgs vietās, kur žņaugi nav efektīvi.

Ražotājs

Axio Biosolutions Private Limited

Plot 18, Gujarat Pharma Techno Park, Sari-Matoda, TA: Sanand, Ahmedabad, Gujarat, India. Pin 382220

© Axio Biosolutions Pvt. Ltd. Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.