



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas kods: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 27,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 4,85 €



Apraksts

Rhino Rescue Brūču Aizvēršanas Komplekts

Nesāpīga, tūlītēja iegriezumu aprūpe • Kompakts risinājums

Aizveriet atvērtā tipa traumas **ātri un bez šuvēm** - jebkurā vietā. Rhino Rescue komplekts ieliek *mini "traumpunktu"* jūsu mugursomā: viss nepieciešamais, lai dezinficētu, savilktu un pārsietu mazas brūces bez adatām, diegiem vai līmēm. Ideāli EDC med-pouchiem, automašīnām, šautuves somām, ceļojumiem un mājas rezervēm.

Komplekta saturs (21 × 24 × 2,5 cm · 165 g)

- 6 × regulējamas aizvēršanas sloksnes (divi spriegošanas "austi" ļauj precīzi savilkt griezuma malas; garākiem griezumiem lietojiet vairākas)
- 1 × BZK antiseptiska salvetīte
- 2 × spirta salvetes (70 % IPA)
- 1 × sterils marles spilventiņš + 1 × pārsienamā saite
- 1 × caurspīdīgs ūdensdrošs plāksteris
- 1 × nitrila cimdi · 1 × traumu šķēres · 1 × adhezīvā lente
- Iliustrēta **pamācība**

Kāpēc Rhino Rescue sloksnes?



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ĀĪS NAV BĒKINS ADMAKSAT)

- **Bez šuvēm** – brūces malas tiek saspiestas bez adatām un anestēzijas.
- **Maināms spriegums** – divi “austi” precīzai regulēšanai.
- **Droša līme + izturīgs flīsa pamats** – turas pat kustībā.
- **Momentāla lietošana** – piem. pārgājienā, darbnīcā, šaušanas sportā.

Lietošanas soļi (kopsavilkums)

1. Uzvelciet cimodus. Notīriet brūci ar spirta un BZK salveti.
2. Noņemiet liekās asinis ar sterilo marli.
3. Noņemiet plēvi un pielīmējiet sloksni abpus brūcei uz sausas ādas.
4. Pavelciet “austi”, līdz brūces malas satiekas; piespiediet, lai fiksētu.
5. Ja vajag, pārklājiet ar caurspīdīgo plāksteri vai pārsēju.

Piezīme: Dziļām, netīrām vai stipri asiņojošām brūcēm nekavējoties meklējiet profesionālu palīdzību.

Iepakojuma specifikācija

Izmērs	≈ 21 × 24 × 2,5 cm
Svars	≈ 165 g
Derīguma termiņš	skat. marķējumu
Pielietojums	Pirmā palīdzība nelieliem griezumiem

Drošība & atbilstība

Lietot tikai uz virspusējām, tīrām brūcēm. Pārbaudiet alerģiju pret līmi.
Vienreizējs sterils produkts. Uzglabāt vēsā, sausā vietā.

Ražotājs / ES atbildīgā persona

EMS RUN / Rhino Rescue

Fenbin Rd 100, 214000 Usi, Ķīna

emsrun.com/contact