



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)  
Компания: SIA „LATLYNX”  
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895  
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,  
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA  
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494  
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга



### Описание

#### **Axiostat® 8×8 см гемостатический пластырь**

**Axiostat® гемостатический пластырь (8×8 см)** – это **стерильное, одноразовое, не абсорбирующее средство**, предназначенное для временной остановки **умеренного и сильного кровотечения** в экстренных и травматических ситуациях. Разработан с использованием технологии **PBT® (Protonated Bioadhesive Polymer Technology)**, он применяет **100% хитозан**, обладающий природными биоадгезивными свойствами, для быстрой остановки крови и создания надёжного барьера. В отличие от покрытых повязок, **Axiostat не содержит белков, не вызывает аллергии** и не оставляет остатков в ране. Лёгкий и вакуумно упакованный – идеальное решение для боевых условий, скорой помощи и догоспитального применения.

#### **Как это работает**

1. **Компрессия:** прикладывается непосредственно к месту ранения.
2. **Адгезия за счёт заряда:** положительно заряженные молекулы хитозана связываются с отрицательно заряженными клетками крови.



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)  
Компания: SIA „LATLYNX”  
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895  
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,  
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA  
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494  
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

3. **Поглощение плазмы:** быстрое впитывание плазмы концентрирует факторы свёртывания.
4. **Активация тромбоцитов:** стимулирует образование тромбоцитов и фибриновой сетки.
5. **Гемостаз:** создаёт прочный барьер, который останавливает кровь быстрее естественного свёртывания.

При физиологическом pH пластырь **легко удаляется**, не вызывая дополнительной травмы.

### Показания

- Огнестрельные ранения
- Ножевые или колотые раны
- Взрывные травмы
- Порезы, разрывы, ссадины
- Артериальное и венозное кровотечение
- Травмы головы, шеи и лица
- Ситуации, где **невозможно применить жгут**

### Основные особенности

- **100% хитозан** – лучший эффект по сравнению с покрытыми повязками
- **Не содержит белков, гипоаллергенен**
- Быстрая остановка кровотечения – **быстрее естественного процесса**
- **Компактная вакуумная упаковка**
- **Можно резать, складывать или упаковывать** в глубокие раны
- Лёгкий и удобный для переноски – идеально для полевых условий

### Характеристики

Размер	8 × 8 × 0,5 см
Материал	100% хитозан
Назначение	Стерильный, одноразовый, не абсорбирующий пластырь
Упаковка	Лёгкая вакуумная упаковка
Сертификаты	BIS, CE, ISO 13485:2016, FDA, NSN (отдельные типы)

### Рекомендованное применение

Идеально подходит для **травматологической помощи, боевых условий, скорой помощи и первой медицинской помощи**. Особенно полезен в случаях, когда жгут неэффективен.

### Производитель

**Axio Biosolutions Private Limited**

Plot 18, Gujarat Pharma Techno Park, Sari-Matoda, TA: Sanand, Ahmedabad, Gujarat, India. Pin 382220

© Axio Biosolutions Pvt. Ltd. Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.